


IHR LOGO

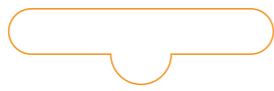

drink |but try!  
Alkoholschnelltest



DER SCHNELLE NÜCHTERNHEITSTEST:

Der Test sollte mindestens 15 Minuten nach dem Alkoholkonsum durchgeführt werden!

1. Korken an beiden Enden entfernen;
2. das Mundstück am matten Ende befestigen;
3. einatmen und 3x 10 Sekunden lang in das Rohr blasen;
4. die Farbe der Substanz mit der Farbskala vergleichen.

Wenn nach einer Minute eine Änderung der Substanz eintritt, auch wenn sie nur minimal ist, bedeutet es, dass der Alkoholgehalt in der ausgeatmeten Luft die gesetzlich vorgegebenen Richtlinien überschreitet.

Kühl, trocken und dunkel lagern.

FAST SOBRIETY TEST:

Measuring should be done at least 15 minutes after alcohol consumption!

1. remove security flaps on both sides;
2. put the mouthpiece on the matt side;
3. take a breath and exhale the air into the device 3 times for 10 seconds;
4. compare the color the color of the middle part with the indication scale.

If after one minute you notice even a small color change in the middle part of the device, it means, that the alcohol content in the exhaled air exceeds the accepted limit.

Keep in dry, cool und darkened conditions.

www.drink-try.com




biotech agency  
DNA - BIOTECHNOLOGIE GMBH

BIOTECH AGENCY  
DNA & BIOTECHNOLOGIE GMBH

Carl Zuckmayer Straße 38  
A - 5028 Salzburg  
Tel. +43 662 450 500  
Fax +43 662 450 500-22

office@biotech-agency.at  
www.biotech-agency.at

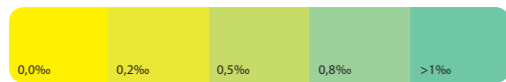


ATTENTION: This breath test is for private use only. It is no legal method to measure your driving ability or alcohol influence.

ACHTUNG: Dieser Alkoholtast dient ausschließlich dem privaten Gebrauch. Es ist keine gesetzlich verwendbare Meßmethode Ihrer Fahrtüchtigkeit bzw. Alkoholeinflussung.

Gebrauchs-  
anweisung  
Rückseite  
(Information)

IHRE WERBUNG

Aufklapper  
innen  
(Information)

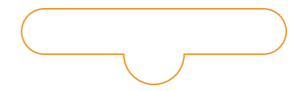

Aufklapper  
innen  
(Information)